

Návod na použitie

poskytnutý zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre žiakov a zamestnancov základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl

Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers

Krok 1: Vloženie skúmavky do pracovnej stanice

Vložte skúmavku do pracovnej stanice dodanej so súpravou.

Pri súpravách obsahujúcich vopred naplnené odberové skúmavky: Z vrchnej časti skúmavky zložte fóliu. Pri súpravách s fľaštičkami s tlmivým roztokom: Do skúmavky pridajte 10 kvapiek tlmivého roztoku.

Krok 2: Odber vzorky z nosa

Použite dodávanú sterilnú výterovú tyčinku a opatrne si ju vložte do jednej nosnej dierky.

Špičku tyčinky zasuňte 2–4cm, kým nepocítite odpor. 5-krát otočte tyčinku v nosnej dierke.

Touto istou tyčinkou zopakujte proces v druhej nosnej dierke, pričom ju znova 5-krát otočte. Vyberte tyčinku z nosnej dutiny a postupujte podľa pokynov na spracovanie vzorky.

Krok 3: Otáčajte tyčinkou

Otočte tyčinku aspoň 6-krát vnútri skúmavky, pričom ju pritlačte o dno aj bočné steny skúmavky.

Krok 4: Nechajte postáť a vložte špičku kvapkadla

Nechajte postáť jednu minútu a ešte niekoľkokrát pritlačte. Potom tyčinku bezpečne vyberte a zlikvidujte a špičku kvapkadla vložte do skúmavky so vzorkou.

Krok 5: Pridajte vzorku na kazetu

Položte kazetu, označte ju a do nádržky pridajte 4 kvapky testovacej vzorky.

Krok 6: Interpretácia výsledkov

Výsledky budú k dispozícii o 15 minút. Po 20 minútach výsledky už neinterpretujte.

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránke výrobcu: <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk>